

# Medi-Prop Surf +

## Détergent Désinfectant concentré

232629 / 232628 / 232627

### AVANTAGES

- Détergent désinfectant Idéal pour une utilisation sur les sols, les surfaces, les mobiliers et les dispositifs médicaux de classe I (lits médicaux, fauteuils roulants, etc...),
- Idéal également en collectivité, hôpitaux, centre de soins, maison de retraite, écoles, cantines, réfectoires...
- Peut s'utiliser sur les surfaces et matériels pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- Formule à pH doux une fois dilué permettant un usage polyvalent.
- Sans EDTA et sans Aldéhyde



Réf. 232627 Colis de 250 doses de 20mL  
 Réf. 232628 Colis de 6 flacons doseurs de 1L  
 Réf. 232629 Colis de 2 bidons de 5L

### COMPOSITION

Chlorure de didécyl diméthyl ammonium CAS n°7173-51-5 (3% m/m), de laurylamine dipropylenediamine CAS n°2372-82-9 (5.1% m/m),

### PROPRIÉTÉS BIOCIDES

### APPLICATIONS

- Utilisation en milieux hospitaliers, agroalimentaires, restaurations, collectivités et industriels.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore  
 Odeur : caractéristique  
 pH (pur) : 12  
 pH dilué à 0,25% : 8 ± 0,2  
 Densité : ~1

Actif sur	Normes	Concentration	Temps de contact
<b>Bactéricidie*</b>	• EN 1276 sur Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogène		5 min
	• EN 13697 sur Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogène	0,25%	15 min
	• EN 13727+A2 sur Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa		5 min
<b>Levuricide*</b>	• EN 1650+A1 sur Candida Albicans		30 min
	• EN 13697 sur Candida Albicans	0,25%	30 min
	• EN 13624 sur Candida Albicans		30 min
<b>Virucidie*</b>	• EN 14476 +A1 sur Norovirus, Adénovirus, Rotavirus	0,25%	15 min
	• EN 14476 +A2	1%	5 min
	• EN 14476 +A2 sur vaccine (MVA)	0,75%	5 min

\*Norme réalisée en conditions de saleté

# Medi-Prop Surf +

## Détergent Désinfectant concentré



232629 / 232628 / 232627

### MODE D'EMPLOI

En balayage ou essuyage humide, lavage mouillé, bio nettoyage. Diluer le produit à 0,25% (soit une dose de 20 mL pour un seau de 8 L) et appliquer à raison de +/- 30 mL/m<sup>2</sup>.

Ne pas rincer, sauf sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Compatible en utilisation auto laveuse à des concentrations ≤ 0,5%. Nettoyer le matériel utilisé à l'eau.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Craint le gel. Ne pas avaler.

Ne pas utiliser avec d'autres produits. Utilisation exclusivement professionnelle.

Produit biocide : TP2 et TP4. Utilisez les biocides avec précautions. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts ou les cours d'eau.

Produit conforme à la législation française relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 19 décembre 2013 qui modifie l'arrêté du 8 sept 1999).

### CONSERVATION

Dans son emballage d'origine fermé entre 5°C et 40°C et dans des conditions normales de stockage à température ambiante. Se conserve pendant 3 ans.

Produit dilué dans un seau de ménage ou autre récipient ouvert : 24 heures.

Produit dilué dans un récipient fermé (bouchon ou tête de pulvérisation) : jusqu'à 7 jours.

Entre chaque utilisation le récipient utilisé pour diluer le produit doit être entièrement vidé et rincé à l'eau.